

**Вопрос:** Можно ли рестерилизовать протезы GORE-TEX®?

**Ответ:** Да, чистые, механически не загрязненные протезы можно рестерилизовать в паровой или газовой стерилизации (Ето) до 3-х раз.

**Вопрос:** Требуется ли немедленное извлечение протеза, если в окружающей его зоне возникла инфекция?

**Ответ:** Инфицирование зоны протеза всегда является событием серьезным, требующим более внимательного наблюдения больного опытным хирургом. Однако, в литературе известно множество сообщений об эффективном лечении инфекций в зоне имплантации сосудистых протезов из растянутого политетрафторэтилена, которые успешно проведены без извлечения имплантированного протеза. Решение об извлечении протеза принимает в каждом конкретном случае соответствующий опытный хирург.

**Вопрос:** Каков желательный размер канюль (игл) и не лучше ли применять двухигольный диализ?

**Ответ:** Можно применять произвольный тип игл согласно потребностям и опыту применения в данном центре диализа, но, помня о том, что, чем меньше пункций, тем меньше вероятность возникновения осложнений.

**Вопрос:** С какими осложнениями следует считаться при применении протезов GORE-TEX®?

**Ответ:** Можно выделить четыре основных виды осложнений:

- засорение канала;
- инфицирование;
- мнимая аневризма;
- кровоизлияние в области протеза.

**Вопрос:** Где можно найти информацию о протезах GORE-TEX® и их применения в диализотерапии?

**Ответ:** Литература и видеофильмы, касающиеся применения протезов фирмы GORE в диализотерапии, имеются в Российском представительстве фирмы GORE. Сотрудники фирмы будут рады предоставить Вам имеющуюся информацию и ответить на интересующие Вас вопросы.

**Вопрос:** Как связаться с представителем фирмы W.L.GORE & Associates?

**Ответ:** Представительство фирмы W.L.GORE & Associates в Москве:  
103064, Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 13/3 стр.1  
Тел./факс:(095) 937-59-47, тел. 937-59-46

**Вопрос:** Как заказать протезы GORE-TEX®?

**Ответ:** Помимо оптовой продажи гемодиализным центрам фирма GORE организует через своих дистрибьюторов розничную продажу имплантатов для пациентов, которые в состоянии самостоятельно их оплатить. Для этого достаточно пациенту или его лечащему врачу связаться с сотрудниками Представительства по вышеуказанным телефонам.